





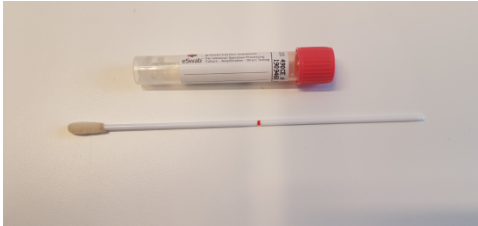



Overzicht afname materiaal

Afnamemateriaal	Onderzoeken	Kleur kaart
	<p>Kunststofpotje met lepeltje voor feces</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salmonella/Shigella/Campylobacter • Yersinia/E. coli O.157/Cholera • Helicobacter pylori antigeen • Norovirus/Sapovirus • Rotavirus/Adenovirus • Enterovirus/Parechovirus • Parasitologie • Clostridium difficile 	<div style="border: 1px solid black; background-color: #f4a460; padding: 2px; text-align: center;">Bruin</div>
	<p>Kunststof potje steriel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urine: algemene kweek/Legionella antigeen/ Pneumococcon antigeen/Bofvirus • Sputum: algemene kweek/TBC • Semen: algemene kweek • Huid(schilfers): schimmelkweek/dermatofyten PCR/ nagels/haren: candida albicans PCR 	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #ffff00; padding: 2px; text-align: center;">Geel</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #90ee90; padding: 2px; text-align: center;">Groen</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #ffff00; padding: 2px; text-align: center;">Geel</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f080f0; padding: 2px; text-align: center;">Licht roze</div> </div>
	<p>Aptima medium voor Soa uit urine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neisseria gonorrhoeae • Chlamydia trachomatis • Trichomonas vaginalis • Mycoplasma genitalium <p>Niet voor Herpes simplex virus (HSV), zie ESwab</p>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4682b4; padding: 2px; text-align: center;">Blauw </div>
	<p>Aptima medium voor Soa dmv uitstrijken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neisseria gonorrhoeae • Chlamydia trachomatis • Trichomonas vaginalis • Mycoplasma genitalium • Fluor vaginalis (Bacteriële vaginose, incl. candida en Trichomonas vaginalis) <p>Niet voor Herpes simplex virus (HSV) zie ESwab</p> <p>BLAUWE STOK IN APTIMA MEESTUREN, NIET DE WITTE</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Wit </div>
	<p>Eswab roze dop geschikt voor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Algemene kweek/Groep B Streptococcon • Candida kweek (en eventueel resistentie) • Kweek Neisseria gonorrhoeae • Influenza A en Influenza B (keel/neusuitstrijk) • Herpes simplex virus (HSV)/Varicella zoster virus (VZV) • Mycoplasma genitalium • Bofvirus (keeluitstrijk) • Enterovirus <p>• Bijzondere resistente micro-organismen (bijv. MRSA, ESBL, VRE). Volgens instructie aanvraagformulier</p> <p>Stok afbreken bij het breekpunt en in buis stoppen, dop goed dichtdraaien om lekken te voorkomen.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Wit</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #ff4500; padding: 2px; text-align: center; margin-top: 10px;">Rood</div>
	<p>Eswab oranje dop geschikt voor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinkhoest (nasopharynx uitstrijk flexibele wattendrager (afhalen bij mmb)) <p>Stok afbreken bij het breekpunt en in buis stoppen, dop goed dichtdraaien om lekken te voorkomen.</p>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #90ee90; padding: 2px; text-align: center;">Groen</div>