



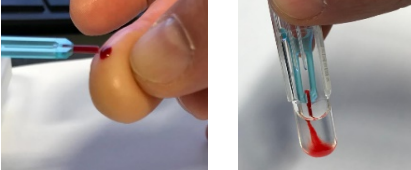

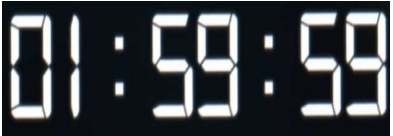


# VERKORTE HANDLEIDING CRP BLOEDAFNAME VOOR HUISBEZOEK

2-1-2023

Hoewel het de absolute voorkeur geniet om de afname en bepaling van een CRP op de praktijk uit te voeren, kan de afname onder strikte voorwaarden wel bij de patiënt worden uitgevoerd.

<p><b>..Start</b></p>	<p>Het POCT-team heeft een transportpakketje samengesteld waarmee u bij een patiënt tijdens een huisbezoek bloed kunt afnemen voor een CRP. Na het uitvoeren van onderstaande stappen kunt u de cuvet met buffer en bloed binnen 2 uur op uw praktijk meten op de CRP-analyzer</p>	
<p><b>Stap 1</b></p>	<p>Neem steeds een opnieuw samengesteld pakket mee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verse cuvet met buffer uit de kit die u in gebruik hebt</li> <li>- Afname capillair uit dezelfde kit</li> <li>- Een lancet voor bloedafname</li> <li>- Een 'rood' transportdopje*</li> <li>- Afsluitbaar potje om spullen mee te vervoeren*</li> </ul> <p>* Bestellen bij POCT-team (gegevens op pag.2)</p>	
<p><b>Stap 2</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haal de folie van de cuvet en zet deze rechtop in het witte dopje dat op de deksel van het potje zit</li> </ul>	
<p><b>Stap 3</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leg de lancet en afnamecapillair klaar</li> <li>- Zorg dat de patiënt warme handen heeft (evt. opwarmen)</li> <li>- Prik de patiënt en veeg de 1<sup>e</sup> druppel weg</li> </ul>	
<p><b>Stap 4</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neem met het capillair 10 µl bloed af</li> <li>- Doe het capillair in de cuvet en sluit af met het bijgeleverde rode dopje</li> </ul>	
<p><b>Stap 5</b> <b>Belangrijk</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantel de cuvet 10 x zodat al het afgenomen bloed uit het afnamecapillair is.</li> <li>- Dit is erg belangrijk. Doet u dit niet, dan zal het bloed in het capillair stollen en zal de bepaling mislukken.</li> <li>- Kantel rustig om schuimvorming te voorkomen</li> </ul>	
<p>Pagina 2 Z.O.Z.</p>	<p>Als u bovenstaande stappen volgt, dan kan de buffer/volbloed oplossing 2 uur bewaard worden tot analyse.</p>	

# VERKORTE HANDLEIDING CRP BLOEDAFNAME VOOR HUISBEZOEK

2-1-2023

Stap 6	<b>Terug op de praktijk:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Maak een ZD aanvraag behorende bij de CRP afname</li><li>- Haal de rode transportdop van de cuvet</li><li>- Plaats nu de reagensdop uit de CRP kit op de cuvet</li></ul>	
Stap 7	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bepaal de POCT-CRP op de reguliere wijze</li></ul>	
EXTRA	<p>Wij adviseren om geen bloed af te nemen in een EDTA buis/cupje. Dit bevat een antistollingsvloeistof en kan ongewenste verdunning opleveren.</p> <p>Wilt u meer informatie? Wilt u Transportpotjes of rode dopjes bestellen? Neem dan contact op met het POCT-team</p> <p>Mail <a href="mailto:m-poct@jbz.nl">m-poct@jbz.nl</a> Telefoon 073-5536459</p>	

# VERKORTE HANDLEIDING CRP BLOEDAFNAME VOOR HUISBEZOEK

2-1-2023

Auteur : H Kuijsters  
Mutator :  
Eigenaar : A van der Horst  
Verzendlijst : Huisartsen

Datum uitgifte : 2-1-2023  
Vakgroep : Overkoepelend  
Type voorschrift : Procedurevoorschrift