




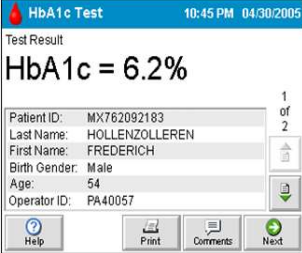
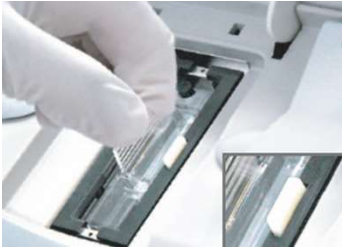


## Start:

Als het apparaat op de screensaver staat raak dan met je vinger het scherm aan. Wanneer er een 'event' op het scherm staat, klik dan op OK en volg de aanwijzingen op. Kijk in de handleiding om eventuele problemen op te lossen of bel met het POCT-team.

- Testcartridge eerst 5 minuten op kamertemperatuur laten komen.

<p>Stap 1</p>	<p><i>Verzamelen van het bloedmonster</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Was de handen van de patiënt</b></li> <li>• Prik, met een groene lancet, in de vinger en veeg de eerste druppel weg</li> <li>• Plaats de capillairhouder in de druppel bloed tot deze volledig gevuld is.</li> </ul>	
<p>Stap 2</p>	<p><i>Schoonmaken capillair</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veeg de capillair voorzichtig schoon met een tissue</li> </ul>	
<p>Stap 3</p>	<p><i>Inbrengen capillairhouder</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breng de capillairhouder in de cartridge.</li> <li>• (de platte kant tegen de zijkant van de cartridge) tot de houder op zijn plaats zit.</li> </ul>	
<p>Stap 4</p>	<p><i>Scannen van de cartridge</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd de cartridge vast met de barcode naar rechts</li> <li>• Haal de cartridge van boven naar beneden door de sleuf</li> <li>• Een piep en een ander scherm geeft aan of de scan gelukt is.</li> <li>• Zo niet haal de cartridge opnieuw van boven naar beneden door de sleuf.</li> </ul>	
<p>Stap 5</p>	<p><i>Inbrengen van de cartridge</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd de cartridge vast met de barcode naar rechts</li> <li>• Maak het klepje open en breng de cartridge in het compartiment tot je een click hoort</li> <li>• Duw met je wijsvinger en duim (linkerhand) de cartridge stevig naar beneden en trek met je andere hand in een vloeiende beweging de zilverkleurige strip omhoog.</li> </ul>	<div data-bbox="1011 1576 1289 1787"> <p><b>HbA1c Test</b> 10:45 PM 04/30/2005</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insert Capillary Holder with sample into Cartridge.</li> <li>2. Open the System Door.</li> <li>3. Insert Cartridge into System.</li> <li>4. Pull Tab out of Cartridge.</li> <li>5. Close the System Door.</li> </ol> <p>Help Cancel</p> </div> 

<p>Stap 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de deksel zodat de test kan starten</li> </ul>	
<p>Stap 7</p>	<p><i>Invoeren patiënten/gebruikers(user) gegevens</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat vraagt nu om het patiënt ID en gebruikers ID</li> <li>• Druk op patiënt ID en scan de barcode van het via zorgdomein aangemaakte patiëntenformulier</li> <li>• Druk op user ID en scan daarna je persoonlijke gebruikers ID (bijgeleverd)</li> <li>• Toets daarna op OK en wacht op de uitslag</li> </ul>	
<p>Stap 8</p>	<p><i>De uitslagen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wacht tot de test klaar is (ongeveer 6 minuten)</li> <li>• Indien nodig print de uitslagen</li> </ul>	
<p>Stap 9</p>	<p><i>Verwijderen van de cartridge</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duw het witte knopje aan de rechterkant naar beneden met je rechter hand</li> <li>• Duw met je linkerhand rustig de cartridge naar rechts</li> <li>• Trek de cartridge omhoog</li> <li>• Gooi de cartridge in de <b>speciale afvallemmer</b> die door het POCT-team is bijgeleverd.</li> </ul>	

Auteur : M. van der Pol  
Mutator : J. van der Elst  
Eigenaar : P. van 't Sant  
Verzendlijst : Huisartspraktijken  
(Zie P:\POCT\werkwijze POCT\0.1 Algemeen\overzichten  
checklijsten\registratie huisartsenproject)

Datum uitgifte : 29.1.2014  
Vakgroep : Overkoepelend  
Type voorschrift : Procedurevoorschrift