

## Urinestrip test met de Cliniteck status +

Voer de test uit met een, bij voorkeur, ochtend urine die niet ouder is dan 2 uur.  
Gekoelde urinemonsters eerst op kamertemperatuur laten komen voordat men de test inzet.


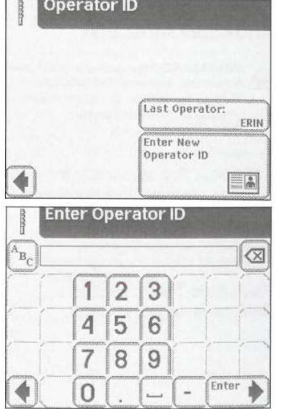
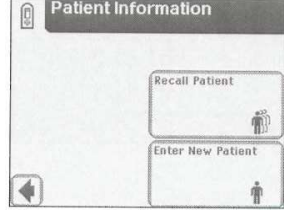
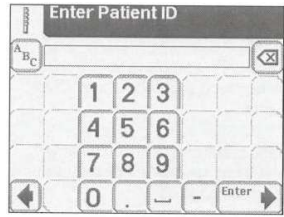
Benodigheden:



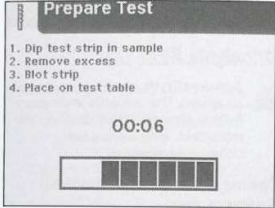
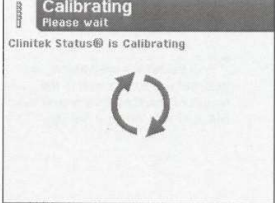
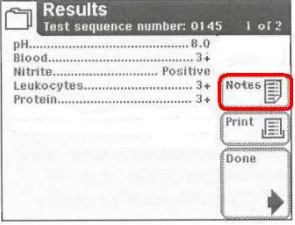
Cliniteck Status +

Siemens Multistix 5 urine teststrips

Urine monster

Tissue om de strip af te vegen

<p>Stap 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de Cliniteck status aan</li> <li>• Zorg dat de testtafel schoon is</li> </ul>	
<p>Stap 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer op het scherm: strip test</li> </ul>	
<p>Stap 3</p>	<p><i>Invoeren gebruikers ID</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer: Enter New Operator Name.</li> <li>• Scan operator ID of voer handmatig in.</li> <li>• Druk op Enter</li> </ul>	
<p>Stap 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer: Enter New Patiënt op het patiënt information scherm</li> </ul>	
<p>Stap 5</p>	<p><i>Invoeren patiëntengegevens</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scan de barcode van het via zorgdomein aangemaakte patiëntenformulier</li> <li>• Het ZD nummer van de patiënt verschijnt automatisch in beeld</li> <li>• Druk op enter</li> </ul>	

<p>Stap 6</p>	<p><i>Bereiding van de test</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem de teststrip uit de verpakking en sluit deze meteen weer.</li> <li>• Selecteer Start</li> <li>• Voer de handelingen van <b>stap 7</b> binnen 8 seconden uit.</li> </ul>	
<p>Stap 7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doop de teststrip in het urinemonster en zorg dat de vlakjes bevochtigd zijn.</li> <li>• Verwijder direct de strip uit het urinemonster.</li> <li>• Verwijder de overtollige urine door de strip langs de rand van het potje te halen.</li> <li>• Zijkant strip licht deppen op een tissue.</li> <li>• Plaats teststrip in de gleuf van de testtafel met de vlakjes naar boven. Schuif de strip zover door dat deze tegen de witte streep aan komt.</li> <li>• Na 8 seconden zal de testtafel automatisch in het instrument getrokken worden.</li> </ul>	  
<p>Stap 8</p>	<p><i>Wanneer de analyse gereed is</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Word het "Results" scherm getoond</li> <li>• Selecteer print als u de uitslag wilt printen</li> <li>• Selecteer done om terug te keren naar het select ready scherm</li> <li>• Verwijder de teststrip</li> <li>• Indien nodig maak de testtafel schoon</li> </ul>	

Auteur : M. van der Pol  
Mutator : J. van der Elst  
Eigenaar : P. van 't Sant  
Verzendlijst : Huisartspraktijken  
(Zie P:\POCT\werkwijze POCT\0.1 Algemeen\overzichten  
checklijsten\registratie huisartsenproject)

Datum uitgifte : 29.1.2014  
Vakgroep : Overkoepelend  
Type voorschrift : Procedurevoorschrift