

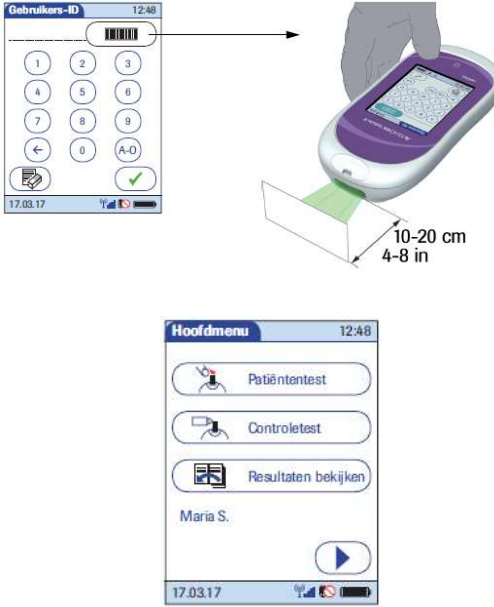

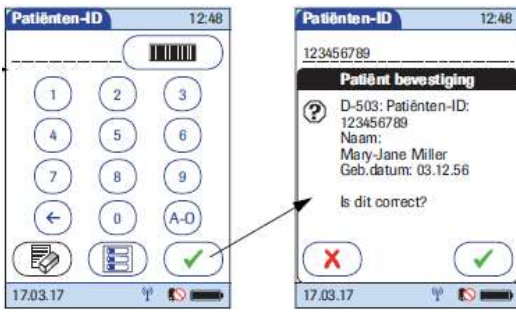







Start:

Analyser staat in principe altijd met het scherm aan, in de base unit (oplader).

In de base unit worden uitslagen doorgestuurd en wordt de Accu-Chek automatisch opgeladen.

<p>Stap 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pak de analyser uit het basis station; het scherm van de analyser gaat uit. • Druk de aan/uit knop in en het scherm licht op. • Binnen 3 seconden zie je het inlogscherf met cijfer toetsen en het scannersymbool (=barcode) 	
<p>Stap 2</p>	<p><i>Invoeren gebruikers ID</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • klik op het scannersymbool rechts bovenin het scherm Je hebt dan 10 seconden om te scannen • Richt de laserstraal op je persoonlijke barcode, je hoort een korte piep en je bent ingelogd. • Naam komt onder de menu-toetsen in het hoofdmenu te staan. <p><i>Of</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Toets je gebruikers ID in mbv het toetsenbord en bevestig met  • Je bent ingelogd. 	
<p>Stap 3</p>	<p><i>Invoeren patiëntgegevens</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Klik op de menu-toets 'patiëntentest' • Klik weer op het scannersymbool rechts bovenin het scherm • Richt de laserstraal op de barcode van het polsbandje van de patiënt, je hoort een korte piep. • Controleer de patiëntgegevens, indien juist druk op  <p><i>Je kunt de cijfertoetsen gebruiken, maar dat heeft geen voorkeur</i></p>	

<p>Stap 4</p>	<p>Aanbrengen teststrip</p> <ul style="list-style-type: none"> - Draag schone/droge handschoenen • Neem een teststrip uit het potje en sluit deze direct. • Houd de teststrip vast met de belettering Accu-Chek naar boven • Schuif de teststrip in de richting van de pijlen op de teststrip zo ver mogelijk in de uitsparing voor de teststrip. (bovenzijde analyser) 	
<p>Stap 5</p>	<p>Verzamelen van het bloedmonster</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was en droog eerst de handen van de patiënt • Prik in de vinger en veeg de eerste druppel weg • Maak een mooie druppel en vul de teststrip in 1 keer • Zodra de druppel is gedetecteerd klinkt er een piep • Houd analyser en strip horizontaal bij afname van de druppel bloed • NOOIT onder de druppel ivm vollopen van uitsparing voor strip 	
<p>Stap 6</p>	<p>Uitslag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tijdens de meting is er een zandloper • Na 6 seconden zie je de uitslag in beeld • Klik op  om de uitslag te accepteren • Verwijder de teststrip uit de analyser • De teststrip mag bij het huishoudelijk afval. <p>Meetbereik 0,6 – 33,3 mmol/l</p>	
<p>Stap 7</p>	<p>Doorsturen resultaten naar HIX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk na gebruik op  • Je bent dan direct uitgelogd • Zet de analyser goed op het basis station. • Als je de analyser 'docked' dan gaat het scherm weer aan om te communiceren • De resultaten worden zo doorgestuurd en de analyser wordt opgeladen 	