

Instructiekaart inzendmaterialen

Let op de houdbaarheidsdatum van het medium; indien over de datum, dan niet gebruiken

Meest voorkomende onderzoeken			Opmerkingen/ bijzonderheden
- Algemene kweek (semen/sputum) - Schimmelkweek/dermatofyten PCR (haren, nagels, huidschilfers)	1 Steriel potje		
- Feces PCR; bacterieel, virus, parasitair - Clostridium difficile toxine - Helicobacter pylori antigeen	2 Feces potje		
- SOA onderzoek PCR (<i>N.gonorrhoeae</i>, <i>C.trachomatis</i>, <i>T.vaginalis</i>, <i>M.genitalium</i>) - Fluor vaginalis PCR (Bacteriële Vaginose, Candida en Trichomonas) - HSV/VZV PCR	3 Swab Aptima		Breek de blauwe stok af en laat deze achter in het buisje.
SOA onderzoek PCR urine (man) (<i>N.gonorrhoeae</i>, <i>C.trachomatis</i>, <i>T.vaginalis</i>, <i>M.genitalium</i>)	4 Urine Aptima		Breng de urine met het bijgeleverde pipetje over in de testbuis. Lever alleen de buis in voor onderzoek.
- Algemene kweek (uitstrijk huid, wond, keel, ect) <i>N.gonorrhoeae</i> kweek - Groep B Streptococci (cervix uitstrijk) - Candida kweek (evt met resistentie)	5 eSwab		- Stugge wattenstok - Breek de afnamestok af en laat deze achter in het buisje.
- Kinkhoest (nasopharynx-uitstrijk) <i>N.gonorrhoeae</i> kweek (urethra man)	6 eSwab		- Flexibele wattenstok - Breek de afnamestok af en laat deze achter in het buisje.
Respiratoire virussen (zoals Influenza en SARS-CoV-2, afname van oropharynx en nasopharynx uitstrijk)	7 Uitstrijk virus		Breek de afnamestok af en laat deze achter in het buisje.
Bijzonder Resistente Micro-Organismen (MRSA, VRE, ESBL, CPE)	8 BRMO		Vul per buisje één formulier in Breek de afnamestok af en laat deze achter in het buisje.
- Algemene kweek (urine) - Legionella/Pneumococci antigeen (urine)	9 Urinekweek		Maak gebruik van gewassen midstream. Lever alleen de buis in voor onderzoek.

Lever het materiaal bij voorkeur dezelfde dag in.

Lukt het niet om het materiaal binnen 4 uur op transport te krijgen? Bewaar het dan bij 2 tot 8 graden.

Het transport mag plaatsvinden bij 1 tot 25 graden.